

GSE INTIMO

PRO OVULI

4actions

**Actúa sobre la mucosa vaginal:
hidrata - protege - mejora la elasticidad - restaura y mantiene el pH vaginal**

Antes de utilizar este producto lea estas instrucciones que contienen información sobre el uso del mismo, importante para el paciente. Guarde estas instrucciones para poder, en su caso, volver a leerlas.

Los óvulos vaginales GSE INTIMO PRO OVULI 4actions crean sobre la superficie de las membranas mucosas de la vagina una barrera protectora que las humedecen y protegen contra incomodidades íntimas y daños de su epitelio por sequedad de la vagina durante las relaciones sexuales, los exámenes médicos ginecológicos o en actividades que suponen movimiento. Al usar este producto sanitario mejora la elasticidad de la vagina, mantiene y restablece el pH correcto de la misma facilitando el mantenimiento de la flora bacteriana de su interior, reduciendo olores desagradables.

Tras aplicar el producto GSE INTIMO PRO OVULI 4actions en el interior de la vagina se crea una capa protectora hidratante de las membranas mucosas que la protege contra lesiones mecánicas e incide en la reducción de incomodidades relacionadas con la sensación de sequedad, tensión, prurito o picor de la superficie de las mismas. Su contenido en Ácido hialurónico y en Vitamina E protege e hidrata la mucosa.

El Ácido láctico propicia que se mantenga el pH correcto de la vagina a nivel de $\leq 4,5$ (ambiente ácido).

COMPOSICIÓN

1 óvulo contiene: Sal sódica del ácido hialurónico, Glucógeno, Ácido láctico, Tocoferol acetato, Lactato de sodio, Witepsol S 58.

INFORMACIONES GENERALES E INDICACIONES

El producto sanitario GSE INTIMO PRO OVULI 4actions está destinado a mujeres en edad fértil y en periodo de menopausia para:

- aliviar la sensación de incomodidad y la sensación de sequedad, tensión, prurito o picor de la superficie de las membranas mucosas relacionados con:
 - atrofia de las membranas mucosas vaginales;
 - insuficiencia de estrógenos;
 - dispareunia (coitos dolorosos);
 - estrés de larga duración;
- Para mejorar la hidratación de la mucosa vaginal en casos de:
 - tras intervenciones quirúrgicas y ginecológicas;
 - abrasiones y las demás lesiones mecánicas de las membranas mucosas de la vagina;
 - tras el parto;
 - tras quimioterapias, radioterapias, crioterapias;
 - tras intervenciones con láser;
 - tras cambios provocados por el uso de medicamentos hormonales;
 - en periodos pre- y post-menopausia.

Se recomienda igualmente este producto como medida preventiva contra cambios adversos en la flora y en el pH de la vagina (viajes, piscina, sauna, fines, con antibióticos) ya que hidrata la vagina manteniendo su pH natural.

Aplicando este producto se reducen los olores desagradables de la vagina.

Producto que no contiene hormonas.

Sin polietilenglicol (PEG), parabenos, tensioactivos tales como, entre otros: SLS, SLES.

INSTRUCCIONES DE USO

Atención:

1. Lavar cuidadosamente las manos antes de aplicar este producto.
2. Sacar 1 óvulo de su blister sacando el film tirando a lo largo de la perforación y apartando las hojas del plástico.
3. Colocar el óvulo en el interior de la vagina.

Atención: Si la consistencia del óvulo es demasiado blanda, colóquelo, antes de sacar de su envase plástico, en la nevera y manténgalo allí unos minutos antes de que se vuelva sólido el óvulo.

Si su médico no le ha recomendado otro sistema, use 1 óvulo por la noche durante 7 días consecutivos. A continuación, para prolongar su acción, coloque 1 óvulo cada 2-3 días en la vagina hasta que desaparezcan los síntomas. No aplicarlo durante más de 30 días.

Si no aplica el óvulo un día, no duplique la colocación del óvulo al día siguiente.

Este producto está destinado exclusivamente para el uso intravaginal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No aplicarlo si tiene hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

No combinar con agentes anestésicos locales ni con otras preparaciones intravaginales ya que este producto puede debilitar o retrasar la acción de los mismos.

No usar combinándolo con preservativos de látex, ni con dispositivos anticonceptivos puestos ya que, dado a su contenido graso, este producto puede limitar la eficacia de los mismos.

No tenga relaciones sexuales justo después de aplicar el óvulo.

Durante su embarazo o periodo de lactancia puede aplicarlo tras consultarlo con un médico o un farmacéutico.

En caso de infección vaginal aguda, aplicarlo solo tras consulta con un médico.

No usar durante los periodos menstruales.

Evitar todo contacto accidental del producto con la mucosa de sus ojos, su nariz o su boca.

Este producto está destinado exclusivamente para el uso intravaginal.

No usarlo pasado el plazo de validez.

No aplicar este producto si el blister está dañado.

No volver a aplicar por una segunda vez.

Debido a su contenido en ácido láctico pueden aparecer reacciones cutáneas ligeras (un ardor o picor ligero) y, sobre todo, si la vagina está muy seca. Dichos síntomas tienen carácter pasajero y, por regla general, desaparecen solos.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Guardarlo en temperaturas entre los 15°C y 25°C.

Mantener guardado en su embalaje original.

Proteger de la luz y las fuentes de calor.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

No aplicar en caso de que el embalaje se encuentre dañado.

Producto de un solo uso. No reutilice el mismo óvulo.

EMBALAJE

2 blisters con 5 óvulos vaginales de 1,6 g 



2274 Producto sanitario



LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 8, 32 - 064 Niegoszowice
tel./fax +48 12/ 283 88 60
www.lideal.pl



PRODECO PHARMA S.r.l. Unipersonale
Via G.Toniolo, 25/1
31033 Castelfranco Veneto (TV) Italia
www.prodecopharma.com
box@prodecopharma.com



LOT Información presente en el envase

Folleto



PAPEL

RECICLAJE SELECTIVO

Folleto: al contenedor azul