

NASAL **MULTI-ACTION**

**Acción descongestionante, emoliente, fluidificante y balsámica.
Coadyuvante en casos de rinitis, sinusitis y sequedad de la mucosa nasal**

GSE NASAL MULTI-ACTION es una solución ligeramente hipertónica de agua de mar enriquecida con: Aceite esencial BIO de naranja, gel BIO de Aloe vera, gluconato de cobre y carboximetil beta-glucano.

INDICACIONES DE USO: El producto sanitario GSE NASAL MULTI-ACTION es un descongestionante nasal. Actúa localmente por ósmosis y ayuda a reducir la congestión e indirectamente, la inflamación. GSE NASAL MULTI-ACTION es una solución hipertónica (1,1%) de agua marina enriquecida con CM beta-glucano, Gluconato de Cobre, Aloe Vera Bio y Aceite Esencial de Naranja. GSE NASAL MULTI-ACTION ejerce su multiacción localmente higienizando las fosas nasales, liberando la nariz del exceso de moco y ayudando a reducir la congestión nasal.

- Fórmula delicada
- Adaptado a edad pediátrica
- Sin vasoconstrictores
- Sin gases propelentes
- No genera adicción ni dependencia

INDICACIONES: GSE NASAL MULTI-ACTION se recomienda como tratamiento coadyuvante prioritario en presencia de procesos inflamatorios como rinitis de distintos orígenes (virales, bacterianos o alérgicos), sinusitis y sequedad de las mucosas nasales.

POSOLOGÍA ACONSEJADA: 1 nebulización en cada fosa nasal 2-4 veces al día, durante 10-15 días.

El producto sanitario ha sido concebido para su uso en edad pediátrica; sin embargo, su uso en los niños debe hacerse bajo la supervisión de los padres. Para los niños de 1 a 3 años, antes de la aplicación, se sugiere consultar al médico de referencia.

INSTRUCCIONES DE USO: Sonarse la nariz antes de la primera nebulización. Pulverizar la solución en ambas fosas, manteniendo la cabeza en posición vertical. Después de la nebulización, presionar ligeramente con el dedo índice en la fosa nasal, a fin de asegurar una distribución de la solución sobre toda la mucosa nasal. Un ligero picor temporal después de la aplicación debe considerarse una acción normal del producto. Después del uso, enjuagar con agua templada la boquilla y secarla con un pañuelo de papel.

DESCRIPCIÓN: La solución hipertónica en contacto con las mucosas nasales obstruidas provoca una secreción de agua, activada por osmosis y ayuda a diluir el moco viscoso acumulado, facilitando su fluidificación. La reducción de la viscosidad del moco mejora el aclaramiento mucociliar y favorece el alejamiento de los virus, bacterias, polen, partículas macro y micro, a través de la expulsión del moco. Los componentes del producto ayudan a la expulsión del exceso de moco, además de efecto protector, e indirectamente emolientes y calmantes sobre la mucosa irritada. Gracias a la eliminación del exceso de secreciones y al tratamiento de las mucosas con sustancias naturales que favorecen la creación de un entorno desfavorable a la contaminación bacteriana (o microbiana), GSE NASAL MULTI-ACTION induce alivio y previene las recaídas.

TOLERABILIDAD Y EFECTOS COLATERALES: La ausencia de vasoconstrictores y la suave acción de sus componentes hacen de GSE NASAL MULTI-ACTION un producto normalmente bien tolerado, cuyo uso frecuente (no superior a 15 días) no comporta adicción ni riesgos de «rinitis medicamentosa». En raros casos puede causar anosmia – debida a la presencia de componentes a base de cobre (Cu(II)). En raros casos puede provocar epistaxis. En raros casos de hipersensibilidad a los componentes, se puede tener una reacción alérgica localizada. Puede causar un leve picor dentro de las fosas nasales en los primeros instantes después del uso. En caso de que se presente cualquier efecto colateral, diferente de los indicados, le rogamos que contacte inmediatamente al fabricante y consultar con el médico de referencia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

- Conservar el producto sanitario en un lugar seco, protegido de la luz
- No usar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes
- Utilizar el producto sanitario a temperatura ambiente (20 °C - 25 °C)
- No exponer el frasco a fuentes de calor
- No usar en caso de lesiones de la mucosa nasal
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No usar en bebés que no hayan cumplido un año
- Para su uso entre los 1 y 3 años, consultar previamente al médico de referencia
- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- No utilizar sobre piel herida
- No utilizar en el conducto auricular
- No utilizar de modos y para fines distintos de los específicamente indicados por el fabricante en estas instrucciones de uso
- No usar después de la fecha de caducidad
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a moluscos y crustáceos
- En caso de reacciones no deseadas o efectos adversos, suspender inmediatamente el tratamiento, consultar al médico e informar al fabricante
- El frasco es de uso estrictamente personal: podría ser vehículo de infección
- No se conocen actualmente contraindicaciones para el uso de los componentes de GSE NASAL MULTI-ACTION en el embarazo o la lactancia; en esos casos, antes de utilizar el producto consultar con el médico.

INGREDIENTES FUNCIONALES:

Maris aqua, hoja de Aloe (*Aloe barbadensis*), gluconato de cobre, carboximetil beta-glucano de sodio, aceite esencial de piel de naranja exprimida (*Citrus sinensis*).

AGUA DE MAR (CONCENTRADA) = ACCIÓN HIGIENIZANTE Y EMOLIENTE

El Agua marina además de limpiar las fosas nasales y alejar polvo y pólenes, en forma hipertónica favorece el aclaramiento mucociliar y la fluidez del exceso de moco, promoviendo la expulsión.

GEL DE ALOE VERA DE CULTIVO BIOLÓGICO

ACEITE ESENCIAL DE NARANJA DE CULTIVO BIOLÓGICO

GLUCONATO DE COBRE = ACCIÓN PRESERVANTE

CM BETA-GLUCANO = ACCIÓN MUCOADHESIVA

Derivado del Beta-glucano, se trata de un polisacárido obtenido por extracción de la pared de las células de levaduras y micetes.

DESECHAR: El dispositivo debe gestionarse conforme al reglamento de gestión de residuos del organismo local competente. Evitar su liberación, tanto de producto como su envase, al medio ambiente.



AURORA S.R.L.

Via degli Scavi, 34 - 47122, Forlì (FC) - Italia
www.aurorasrl.net - info@aurorasrl.net



PRODECO PHARMA S.r.l. Unipersonale

Via G. Toniolo, 25/1 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) Italia
www.prodecopharma.com - box@prodecopharma.com



PAPEL

Reciclaje selectivo:

Papel en el contenedor azul

2079

REF 2590121237

Rev.00: 09/10/2024

REF