

GSE EAR DROPS FREE

Soluzione otologica per la sintomatologia dolorosa ed infiammatoria dell'otite esterna e per la rimozione meccanica del tappo di cerume.

GSE EAR DROPS FREE è una soluzione otologica che, grazie all'azione idratante e protettiva sulla mucosa della glicerina vegetale, promuove l'attenuazione dei sintomi quali dolore, rossore ed edema caratteristici dell'otite esterna. Il carattere igroscopico della glicerina vegetale inoltre favorisce l'eliminazione meccanica di eventuali residui d'acqua bloccati all'interno del condotto uditivo, prevenendo le contaminazioni microbiche che possono determinare l'insorgere dell'otite esterna di origine balneare. Gli estratti di semi di Pompelmo, Ippocastano e di Ribes nero, dall'azione emolliente, contribuiscono ad alleviare i sintomi, dando un rapido e prolungato sollievo. L'applicazione della soluzione otologica ammorbidisce il tappo di cerume e ne favorisce la rimozione.

INGREDIENTI

Ingredienti funzionali (95,3 %): Glicerina vegetale. Altri ingredienti: Estratto di Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*), Estratto di Ribes nero (*Ribes nigrum*), Estratto di semi di Pompelmo (*Citrus x paradisi*).

SENZA CONSERVANTI - ADATTO AI VEGANI

ISTRUZIONI PER L'USO

Al bisogno, inclinare la testa e instillare 1-2 gocce (per 3-4 volte al dì) direttamente nel condotto uditivo; mantenere tale posizione per qualche minuto e ripetere, se necessario, l'operazione per l'altro orecchio. Una volta aperta la pipetta deve essere utilizzata entro le 24 ore.

CONTROINDICAZIONI

Non somministrare a pazienti con accertata ipersensibilità individuale ai componenti del prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il prodotto è solo per uso otologico. Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, per evitarne un uso improprio. L'impiego da parte dei bambini dipende dalla capacità degli stessi di utilizzare correttamente le pipette; la somministrazione da parte dei bambini deve perciò essere effettuata con la supervisione di un adulto. Non utilizzare se il prodotto risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. In caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti, evitare l'uso del prodotto. In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

EFFETTI INDESIDERATI

Attualmente non sono noti effetti indesiderati attribuibili a GSE EAR DROPS FREE. Vi preghiamo di indirizzare le vostre segnalazioni o i vostri suggerimenti ad advicewelcome@prodecopharma.com. Se si manifesta una reazione avversa, si rivolga al medico o al farmacista.

INTERAZIONI

Attualmente non sono note interazioni con altre preparazioni o trattamenti per l'uso concomitante di GSE EAR DROPS FREE.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente. Conservare lontano da fonti di luce e di calore.

CONFEZIONE

10 pipette richiudibili da

0,3 ml e 

CE GSE EAR DROPS FREE
è un Dispositivo Medico di classe I
secondo la direttiva 93/42/CEE e s.m.i.

Data di ultima revisione di questo foglietto illustrativo: Gennaio 2026

LEGENDA DEI SIMBOLI



Leggere le istruzioni prima dell'uso



Non utilizzare se la confezione è danneggiata



Volume nominale



Data di scadenza



Proteggere dalla luce



Numero di catalogo



Numero di lotto



Non disperdere nell'ambiente



Fabbricante



PRODECO PHARMA Srl Unipersonale
Via G. Toniolo, 25/1 - 31033 Castelfranco V.to (TV)
www.prodecopharma.com - box@prodecopharma.com

Foglietto   CARTA
Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo comune