


Fiale monouso per aerosol


GSE Aerobiotic® è una soluzione per aerosol indicata per favorire l'eliminazione del muco in eccesso consentendo l'attenuazione dei sintomi legati ad irritazione ed infiammazione. La soluzione, microbiologicamente controllata grazie all'azione dell'Estratto di semi di Pompelmo, è arricchita con estratti vegetali di Drosera, Echinacea, Enula e Timo che grazie alle loro proprietà contribuiscono al ripristino del fisiologico equilibrio delle vie respiratorie. Gli oli essenziali di Pino mug e Timo comune esplicano un'azione balsamica.

SENZA GLUTINE - SENZA ALCOOL


ISTRUZIONI PER L'USO

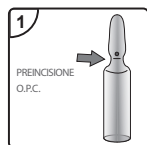


1 Il prodotto è confezionato in fiale dotate di sistema O.P.C. (One Point Cut). Al di sotto del puntino bianco, è presente una preincisione che ne facilita l'apertura

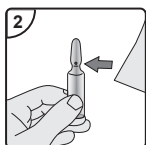

2 Per aprire la fiala, orientarla con il puntino bianco rivolto verso l'alto

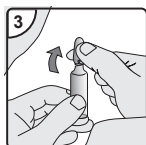

3 Tenendo con una mano la parte inferiore della fiala, staccare con l'altra mano la parte superiore, in direzione opposta al puntino bianco

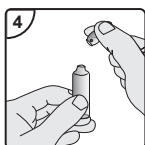

4 La fiala dovrà essere aperta a partire dalla preincisione

Nebulizzare una fiala, senza diluirla, per 1 o 2 volte al dì. Il prodotto è nebulizzabile con tutte le tipologie di apparecchi aerosol (a pistone, a ultrasuoni, ecc.).



AVVERTENZE

In caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti, evitare l'uso del prodotto. Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se il prodotto risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. In caso di sensibilizzazione sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.



Soluzione per aerosol
10 fiale da 5 ml e



GSE AEROBIOTIC®
è un Dispositivo Medico di classe IIa
secondo la direttiva 93/42/CEE e s.m.i.



PRODECO PHARMA Srl Unipersonale
Via G. Toniolo, 25/1 - 31033 Castelfranco V.to TV
www.prodeco-pharma.com - box@prodeco-pharma.com

Foglietto d'uso
Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo comune