

GSE EYE BABY SPRAY

GSE EYE BABY SPRAY è una soluzione salina sterile, a pH fisiologico, ad uso oculare e perioculare.

GSE EYE BABY SPRAY è un valido aiuto per la rimozione delle secrezioni perioculari ed oculari del neonato fin dai primi giorni di vita, del lattante e del bambino (quindi da 0 a 6 anni di età). Il prodotto può essere utilizzato anche da bambini di età superiore a 6 anni, adolescenti, adulti e persone anziane (ovvero oltre i 65 anni).

L'instillazione di GSE EYE BABY SPRAY ammorbidente lava via le secrezioni presenti sulla superficie oculare, nei fornici congiuntivali e nel margine palpebrale.

GSE EYE BABY SPRAY espleta un'azione diluente, decongestionante e idratante per aumento del volume delle lacrime.

GSE EYE BABY SPRAY contiene acque distillate di Eufrasia e Echinacea che contribuiscono all'effetto umettante grazie alla loro azione idratante.

GSE EYE BABY SPRAY è compatibile con lenti a contatto morbide.

DESTINAZIONE D'USO

GSE EYE BABY SPRAY è destinato alla rimozione delle secrezioni perioculari ed oculari del neonato, fin dai primi giorni di vita, del lattante e del bambino (da 0 a 6 anni). Il prodotto può essere utilizzato anche da bambini di età superiore ai 6 anni, adolescenti, adulti e anziani (ovvero oltre i 65 anni).

GSE EYE BABY SPRAY è destinato anche a lenire il discomfort oculare.

INDICAZIONI

GSE EYE BABY SPRAY è indicato:

- per la deterzione quotidiana delle palpebre e degli occhi dei neonati, dei lattanti e dei bambini e per la deterzione degli occhi anche in casi di congiuntivite neonatale;
- per agevolare la rimozione delle secrezioni oculari o residui di sporco dovuti all'aumentata viscosità del muco o a fattori ambientali come ad esempio pulviscolo, pollini, allergeni, salsedine;
- per facilitare la rimozione delle secrezioni oculari e perioculari in caso di inflammatiile dell'occhio e blefariti.
- per rimuovere le secrezioni purulente e per la diluizione del film lacrimale in caso di stenosi dei dotti lacrimali (frequente nei neonati);
- in caso di ambliopia, per il controllo della carica microbica dell'occhio sottoposto a bendaggio grazie alla diluizione dei microrganismi per aumento del volume lacrimale. Durante il trattamento, il prodotto è instillato nell'intervallo tra un bendaggio e l'altro e per l'umettamento se in presenza di una lente a contatto.

GSE EYE BABY SPRAY è inoltre indicato per:

- alleviare sensazioni di fastidio agli occhi ed arrossamento della mucosa oculare causati da fattori climatici come vento, caldo eccessivo o eccessiva esposizione alle radiazioni solari;
- alleviare la sensazione di fastidio causata da allergie stagionali e diverse forme di congiuntivite allergica;
- ridurre la sensazione di bruciore, fastidio o prurito oculare dovuti a occhio secco causato da fattori ambientali;
- ridurre la sensazione di occhio secco/corpo estraneo a seguito di terapia farmacologica.

GSE EYE BABY SPRAY può essere utilizzato anche più volte al giorno.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro (0,82%), Vitamina E TPGS, Acqua distillata di Echinacea pallida, Acqua distillata di Eufrasia, Zinco sulfato epatato, Acido citrico monoidrato, Sodio citrato tribasico diidrato, Acqua per preparazioni iniettabili.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso.
- Impugnare il flacone in modo che il dito che si utilizza per l'erogazione (indice o pollice) sia ben posizionato sull'erogatore e non copra il foro di nebulizzazione.
- Tenere il flacone in verticale ed esercitare una pressione decisa sull'erogatore per nebulizzare la soluzione.
- In caso di erogazione diretta nell'occhio nebulizzare il prodotto ad una distanza di circa 10 cm dall'occhio.
- In occasione del primo utilizzo, erogare alcune volte a vuoto fino a che non si osserva una nebulizzazione regolare del prodotto.
- In caso di conservazione a temperatura inferiore a 15°C, se il prodotto è destinato all'impiego sui bambini, tenere qualche minuto il flacone tra le mani per portare il prodotto a temperatura ambiente per evitare al bambino una sensazione sgradevole di freddo.
- Utilizzare il prodotto come segue:
 - per il risciacquo dell'area perioculari in luogo delle convenzionali salviette inumidite od imbomite: nebulizzare 1 o 2 spruzzi di soluzione su una garza sterile e utilizzarla per ripulire immediatamente e delicatamente la zona intorno agli occhi, eliminando le eventuali secrezioni. Evitare di strofinare con forza ma ammorbidente le secrezioni secche con la garza imbevuta sino a quando non si riesce ad asportarle. Utilizzare una garza diversa per ogni occhio;
 - per il risciacquo dell'occhio: nebulizzare 1 o 2 spruzzi di prodotto in ogni occhio, aperto oppure chiuso;
 - nebulizzando ad occhio aperto, l'ammiccamento conseguente all'aumento di volume del liquido lacrimale consente al prodotto di lavare la superficie dell'occhio allontanando le particelle estranee insieme all'eccesso di liquido;

- nebulizzando ad occhio chiuso, il liquido che resta intrappolato nella rima palpebrale, grazie all'ammiccameto entra a contatto con la superficie oculare, aumentando il volume del liquido lacrimale e consentendo così al prodotto di lavare la superficie dell'occhio allontanando le particelle estranee insieme all'eccesso di liquido;
- per alleviare sensazioni di fastidio o arrossamento: nebulizzare 1 o 2 spruzzi di prodotto in ogni occhio.

• Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è esclusivamente per uso oftalmico o perioculari.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il flacone risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'utilizzo non toccare l'occhio, né altre superfici, con la superficie di nebulizzazione dell'erogatore.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di effetti indesiderati durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione e/o piante Asteraceae e/o piante Orobanchaceae.
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare.
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Consultare il medico prima dell'utilizzo in gravidanza o allattamento.
- Per uso esterno, non ingerire.
- Non manomettere o danneggiare il flacone ed i suoi meccanismi.
- GSE EYE BABY SPRAY non sostituisce l'eventuale terapia farmacologica prescritta dal medico.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

EFFETTI INDESIDERATI

Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa fra 2°C e 30°C in un luogo asciutto, lontano dal calore, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.


Il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

Flacone con erogatore spray contenente 10 ml di soluzione sterile senza conservanti.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta.

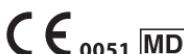

DT/01/DT/005



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia



PRODECO PHARMA S.r.l. Unipersonale

Via G.Tonolo, 25/1 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) Italia

www.prodecopharma.com - box@prodecopharma.com

Foglietto PAP CARTA
Prodeco Pharma Rev.00 20/07/2023
Prodeco Pharma Cod. GS01.2310
Ultima revisione: 02/02 del 11/2023



Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo comune