

GSE EAR DROPS FREE

Soluzione otologica per la sintomatologia dolorosa ed infiammatoria dell'otite esterna e per la rimozione meccanica del tappo di cerume.

GSE EAR DROPS FREE è una soluzione otologica che, grazie all'azione idratante e protettiva sulla mucosa della glicerina vegetale, promuove l'attenuazione dei sintomi quali dolore, rossore ed edema caratteristici dell'otite esterna. Il carattere igroscopico della glicerina vegetale inoltre favorisce l'eliminazione meccanica di eventuali residui d'acqua bloccati all'interno del condotto uditivo, prevenendo le contaminazioni microbiche che possono determinare l'insorgere dell'otite esterna di origine balneare. Gli estratti di semi di Pompelmo, Ippocastano e di Ribes nero, dall'azione emolliente, contribuiscono ad alleviare i sintomi, dando un rapido e prolungato sollievo. L'applicazione della soluzione otologica ammorbidisce il tappo di cerume e ne favorisce la rimozione.

COMPOSIZIONE

Ingredienti funzionali (96 %): Glicerina vegetale. Altri ingredienti: Estratto di Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*), Estratto di Ribes nero (*Ribes nigrum*). Estratto di semi di Pompelmo (*Citrus x paradisi*).

SENZA CONSERVANTI - ADATTO AI VEGANI

ISTRUZIONI PER L'USO

Al bisogno, inclinare la testa e instillare 1-2 gocce (per 3-4 volte al dì) direttamente nel condotto uditivo; mantenere tale posizione per qualche minuto e ripetere, se necessario, l'operazione per l'altro orecchio. Una volta aperta la pipetta deve essere utilizzata entro le 24 ore.



AVVERTENZE

Il prodotto è solo per uso otologico. Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, per evitarne un uso improprio. L'impiego da parte dei bambini dipende dalla capacità degli stessi di utilizzare correttamente le pipette; la somministrazione da parte dei bambini deve perciò essere effettuata con la supervisione di un adulto. Non utilizzare se il prodotto risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. In caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti, evitare l'uso del prodotto. In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



GSE EAR DROPS FREE

è un Dispositivo Medico di classe I
secondo la direttiva 93/42/CEE e s.m.i.

10 pipette richiudibili

0,3 mle



LEGENDA DEI SIMBOLI



Leggere le istruzioni
prima dell'uso



Non utilizzare se la
confezione è danneggiata



Volume nominale



Data di scadenza



Proteggere dalla luce



Numero di catalogo



Numero di lotto



Non disperdere
nell'ambiente



Fabbricante



PRODECO PHARMA Srl Unipersonale

Via G. Toniolo, 25/1 - 31033 Castelfranco V.to TV

www.prodecopharma.com - box@prodecopharma.com

Foglietto
RACCOMANDA
CARTA
Raccogli differenzia
Verifica le disposizioni del tuo comune

Rev.13: 17/09/2025

IC: GS01.0201

0201

REF