

GSE INTIMO

PROOVULI

4actions

**Agisce sulla mucosa vaginale:
idratata - protegge - migliora l'elasticità - ripristina e mantiene il pH vaginale**

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente il foglietto illustrativo contenente importanti informazioni per la paziente. Conservare il foglietto illustrativo, potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo.

Gli ovuli vaginali GSE INTIMO PRO OVULI 4actions creano una barriera protettiva sulla mucosa vaginale che la idrata e la protegge in caso di fastidi intimi e lesioni provocate dalla secchezza vaginale che si può avvertire durante rapporti sessuali, visite ginecologiche e attività sportive. L'uso del dispositivo medico migliora l'elasticità vaginale, mantiene e ripristina il pH fisiologico, favorendo il mantenimento della normale flora batterica e la riduzione dei cattivi odori.

Dopo l'applicazione, GSE INTIMO PRO OVULI 4actions forma sulla mucosa vaginale un film protettivo che la protegge da lesioni meccaniche e contribuisce alla riduzione del fastidio legato alla sensazione di secchezza, tensione, prurito e bruciore. L'Acido ialuronico e la Vitamina E, contenuti nel dispositivo, proteggono e idratano la mucosa. L'Acido lattico favorisce il mantenimento del corretto pH vaginale $\leq 4,5$ (ambiente acido).

COMPOSIZIONE

1 ovulo contiene: Sale sodico dell'acido ialuronico, Glicogeno, Acido lattico, Tocoferolo acetato, Sodio lattato, Witepsol S 58.

INFORMAZIONI GENERALI E INDICAZIONI

Il dispositivo medico GSE INTIMO PRO OVULI 4actions è destinato alle donne in età fertile e in menopausa al fine di:

- Alleviare la sensazione di fastidio e secchezza vaginale, tensione, prurito e bruciore della mucosa vaginale legati a:
 - atrofia della mucosa vaginale;
 - carenza degli estrogeni;
 - dispareunia (dolore genitale avvertito durante i rapporti sessuali);
 - stress prolungato;
- Per favorire l'idratazione della mucosa vaginale:
 - dopo interventi di chirurgia ginecologica
 - dopo abrasioni e altre piccole lesioni meccaniche della mucosa vaginale;
 - dopo il parto;
 - dopo chemioterapia, radioterapia e crioterapia;
 - dopo interventi laser;
 - in caso di lesioni originate da terapia ormonale;
 - nel periodo pre e postmenopausa.

L'uso del dispositivo medico è anche consigliato per favorire la prevenzione delle alterazioni del pH e della flora batterica vaginale (viaggi, piscina, sauna, palestra, terapia antibiotica), idratando e mantenendo il pH naturale della vagina.

L'utilizzo del prodotto riduce gli odori vaginali sgradevoli.

Il prodotto non contiene ormoni.

Senza PEG, parabeni, detergenti tra cui: SLS, SLES.

ISTRUZIONI PER L'USO

Nota Bene:

1. Prima dell'uso lavare accuratamente le mani.
 2. Strappare il blister lungo la linea pretagliata, separare i due lembi della confezione ed estrarre un singolo ovulo.
 3. Inserire l'ovulo in vagina cercando di arrivare in profondità.
- Attenzione: Se il dispositivo presenta una eccessiva morbidezza, prima di estrarlo dal blister si consiglia di riporlo per qualche minuto in frigorifero finchè non raggiunge la consistenza desiderata.

Se non diversamente specificato dal medico, si consiglia di applicare 1 ovulo alla sera per 7 giorni consecutivi. Per mantenere l'effetto, si consiglia di ripetere l'applicazione di 1 ovulo ogni 2-3 giorni fino alla scomparsa dei sintomi. Non protrarre il trattamento per più di 30 giorni.

Non somministrare una doppia dose per recuperare la dose dimenticata.
Somministrare il prodotto solo ed esclusivamente per via vaginale.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità verso uno qualsiasi dei componenti.
Non usare in concomitanza con anestetici topici e/o altri preparati vaginali, il dispositivo può indebolirne o ritardarne l'effetto.
Non usare in concomitanza con preservativi in lattice e diaframmi contraccettivi, il dispositivo, contenendo grassi, può diminuirne l'efficacia.
Evitare i rapporti sessuali subito dopo l'applicazione dell'ovulo.
In gravidanza e allattamento il dispositivo può essere usato solo dopo aver consultato il medico o il farmacista.
In caso di vaginite acuta il dispositivo può essere usato solo dopo aver consultato il medico.
Non usare durante le mestruazioni.
Evitare il contatto accidentale del dispositivo con occhi e mucose del naso o della bocca.
Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso vaginale.
Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.
Non utilizzare il prodotto se il blister è danneggiato.
Non tentare di riutilizzare gli ovuli accidentalmente fuoriusciti dopo il primo tentativo di utilizzo.
Contiene acido lattico che può causare leggere reazioni cutanee (lieve bruciore o prurito), in particolare in presenza di un'importante secchezza vaginale. I sintomi sono di natura transitoria e di norma scompaiono spontaneamente.

CONSERVAZIONE

Conservare a una temperatura di 15°C - 25°C .
Conservare nella confezione originale.

Tenere al riparo da fonti di luce e calore.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Monouso. Non riutilizzare lo stesso ovulo.

CONFEZIONE
2 blister da 5 ovuli vaginali da 1,6 g e



CE 2274 Dispositivo medico



LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 8, 32 - 064 Niegoszowice
tel./fax +48 12/ 283 88 60
www.lideal.pl



PRODECO PHARMA S.r.l. Unipersonale
Via G.Toniolo, 25/1
31033 Castelfranco Veneto (TV) Italia
www.prodecopharma.com
box@prodecopharma.com



LOT Informazioni presenti nell'imballaggio



Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo comune